

TIPPS FÜR PFLEGE UND REINIGUNG DER POLSTER

AGA-JUS (JUS-2000)

Beseitigung von alltäglichen Verschmutzungen

- ① Die Reinigung der Polster ist mit einer Mischung aus handwarmem Wasser und neutralem Seifenschaum vorzunehmen.
- ② Ein Mikrofaser Tuch mit dem handwarmen Seifenwasser benetzen und Verschmutzungen mit kreisenden Bewegungen beseitigen.
- ③ Hartnäckigere Flecken sollten mit einer weichen Bürste behandelt werden.
Die Bürste ebenfalls mit der handwarmen Seifenlauge benetzen und Verunreinigungen mit kreisenden Bewegungen entfernen.
- ④ Die mit Seifenlauge versehene Materialoberfläche ist mit einem feuchten Mikrofaser Tuch, das in handwarmes Wasser getaucht wurde, abzuwischen.
- ⑤ Abtrocknen der Oberfläche!
- ⑥ Für schwerere Verschmutzungen ist ein alkoholisches Flächendesinfektionsmittel (z.B. Meliseptol der Fa. B. Braun) empfehlenswert.
- ⑦ Material wie unter Punkt ⑤ und ⑥ weiterbehandeln.

Für die Reinigung der Polster dürfen **keine** Lösungsmittel und scheuernde Produkte zum Einsatz kommen.

Die aufgeführten Hinweise sind keine Garantie und befreien den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht im Umgang mit den Materialien und Reinigungsmittel.

AGA Sanitätsartikel GmbH

Löhner Str. 198b
D-32584 Löhne
Tel +49 (0)5731 82283
Fax +49 (0)5731 81976
info@agasan.com
www.agasan.com

Empfohlene Desinfektionsmittel

Produkt	Hersteller	Griffine	DARTEX
Hexaquart forte	B. Braun Medical	✓	
Hexaquart plus		✓	✓
Meliseptol			
Meliseptol rapid			
Melisept SF		✓	
Melsitt		✓	✓
Microbac forte	Bode Chemie GmbH	✓	✓
Bacillol AF			✓
Microbac Tissues		✓	✓
Biguanid Fläche N	Dr. Schumacher GmbH		
Cleanisept		✓	✓
Optisal N			
Optisept			
Incidur Spay	Ecolab GmbH		
Incidur N			✓
Incidin perfekt			
Incidin PLUS		✓	
Incidin Extra			✓
Incidin Extra N		✓	✓
Incidin Liquid Spray			
Incidin Rapid			
Pursept FD	Merz		
Aldasan 2000	Lysoform		
Clorina			✓
Fugaten		✓	✓
Hospisept Tuch		✓	✓
Lysoformin			
Lysoformin spezial			
Lysoformin 2000			
Trichlorol			✓
Mikrozid AF liquid		✓	✓
Mikrozid sensitiv liquid	✓	✓	
perform	Schülke & Mayr		
Terralin liquid			✓
Terralin protect			✓

Griffine: antistatisches, schwarzes Kunstleder als Standardpolsterbezug bei allen medizinischen Hockern und Stühlen

DARTEX: PU-beschichteter Polsterbezugstoff für OP-Tische

Achtung: Die Anwendungshinweise der Desinfektionsmittelhersteller sind zu beachten!

Anmerkung:

Da wir weder Einfluss auf die Herstellung der Desinfektionsmittel und die verwendeten Rohstoffe noch auf die korrekte Anwendung haben, lehnen wir jegliche Garantieleistung auf Desinfektionsmittelbeständigkeit ab.