

AGA-OP-POWER-MAT Operationstische

Der Operationstisch AGA-OP-POWER-MAT besticht nicht nur durch seine Funktionalität sondern auch durch seine formschöne exolierte Hubsäule. Der AGA-OP-POWER-MAT wird über eine Hydraulik mittels Fußpumpe in der Höhe verstellt.

Eigenschaften

- Die Hubsäule besteht aus exoliertem Leichtmetall.
- Sämtliche Polsterteile sind auch hier manuell verstellbar. Durch diese Art der Konstruktion, die unabhängig von einer Energiequelle ist, ergibt sich für den AGA-OP-POWER-MAT ein äußerst niedriger Preis.
- Die abnehmbaren Polstersegmente (Stärke 65 mm) bestehen aus Polyurethan-Weichschaumstoffen und sind mit einem schwarzen, elektrisch leitfähigen Kunstleder (bestehend aus einem Baumwoll-/Polyester Mischgewirke und einer Beschichtung aus 100% PVC-Compound) bezogen.
- Das Kopfteil ist stufenlos positiv und negativ per Klemmstangenmechanismus verstellbar.
- Die Rücken- und Sitzteilverstellung sowie die einzeln um 90° abklappbaren Beinauflagen werden durch Gasdruckfedern unterstützt.
- An den Rahmenaußenseiten der Rücken-, Sitz- und Beinteile befinden sich Normschienen zum Anbringen von Armauflagen, Narkosebogen, Beinhaltern, usw.



1 MP-1050/5Y, LR/Z-50

Verstellmöglichkeiten

- Kopfteil +20°/-30°
- Rückenteil +45°/-20°
- Trendelenburg 20°
- Antitrendelenburg 8°
- Sitzteil +40°/-10°
- Beinplatten 0°/-90°
- Höhe 785 - 1085 mm

Zubehör

- Papierrollenhalter PU-2049
- Faheinrichtung mit Zentralverstellung LR/Z-50 (Ø 50 mm), nicht nachrüstbar.
- Weiteres Zubehör befindet sich auch den Katalogseiten 14-19.

Erfahren Sie mehr online und im AGA Katalog auf der Seite 8.



4 MP-1050/5Y, LR/Z-50



2 MP-1050/5Y, NB-30560, BKO-2522, LR/Z-50




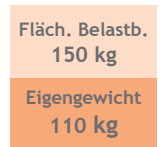


Foto	Bestellnummer	Breite (mm)	Rahmen		Preise (EUR)
			CrNi 18/10	Farbe	
in 1 - 4	MP-1050/5Y	500		x	
ähnlich 1 - 4	MP-3050/5Y	500	x		

AGA-OP-POWER-MAT Ausstattungsoptionen

Die Operationstische AGA-OP-POWER-MAT sind für verschiedene Einsatzgebiete bzw. Untersuchungsarten konzipiert worden. Sie wurden dementsprechend mit unterschiedlichen Komponenten ausgerüstet. Nachfolgend finden Sie eine Kurzbeschreibung der einzelnen Ausstattungsoptionen.

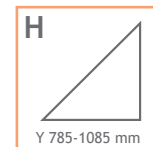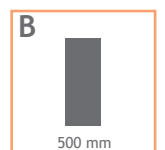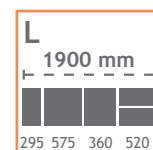

5 MP-1050/5YGYN, MP-RF, VA-30/MP, LR/Z-50, PU-2049

Optionen

- Kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell und Kunststoffsockelabdeckung (Bestell-Nr. MP-1050/5Y)
- Glasperlengestrahktes Edelstahlgestell und Edelstahlsockelabdeckung (Bestell-Nr. MP-3050/5Y).
- Fach für Röntgenkassetten (Bestell-Nr. MP-RF), ca. 435 x 305 mm, unter dem Beckenteil, nicht nachrüstbar.
- Edelstahlschale (Bestell-Nr. VA-30/MP), ca. 250 x 190 x 45 mm, nicht nachrüstbar.
- Polstersegmente als Polsterauflagen, Stärke ca. 40 mm (Bestell-Nr. MP-PAL). Die Oberseiten sind nahtfrei gehalten. An den Unterseiten befinden sich Flauschbänder. Die Polsterauflagen werden mit den Flauschbändern an den Hakenbändern, die sich auf den 15 mm starken röntgenstrahlendurchlässigen Trägerplatten befinden, fixiert.
- Beinteile in geteilter, abnehm- und spreizbarer Ausführung (Bestell-Nr. MP-BTSA) statt lediglich um 90° abklappbar. Verstellweg: 0°/90°, Spreizbarkeit: 0°/90°.
- Statt der Kopfteilverstellung per Klemmstangenmechanismus ist der AGA-OP-POWER-MAT auch mit einer Kopfteilverstellung per Gasdruckfeder (Bestell-Nr. KVG) erhältlich.

Erhältliche Kombinationen:

- MP-1050/5YGYN beinhaltet den OP-Tisch MP-1050/5Y mit Gyn-Ausschnitt, MP-PAL und MP-BTSA.
- MP-3050/5YGYN ist identisch ausgestattet wie MP-1050/5YGYN, wird aber mit einem glasperlengestrahkten Edelstahlgestell und Edelstahlsockelabdeckung geliefert.



6 MP-1050/5YGYN, MP-RF, VA-30/MP, LR/Z-50, PU-2049



7 MP-1050/5YGYN, MP-RF, VA-30/MP, BHG-600, BKG-600, RL-2060, LR/Z-50, PU-2049

Zubehör

- Beinhalter nach Göpel (Bestell-Nr. BHG-600) und Befestigungskloben nach Göpel (Bestell-Nr. BKG-600).
- Ringarmlehnen (Bestell-Nr. RL-2060).

Weitere Zubehörteile befinden sich online und auf den Katalogseiten 14-19.

Foto	Bestellnummer	Breite (mm)	Rahmen		Preise (EUR)
			CrNi 18/10	Lack	
in 5 - 7	MP-1050/5YGYN	500		x	
ähnl. 5 - 7	MP-3050/5YGYN	500	x		